


Čtečka mikročipů Halo Angel s USB


Gratulujeme, stali jste se majiteli čtečky mikročipů s konektorem USB. Tato čtečka umí přečíst všechny FDX-B / FDX-A mikročipy v souladu s normou ISO 11784/11785. Před prvním použitím je nutné přístroj nabít připojením k USB konektoru ve vašem PC, popř. jiném zařízení. Postupujte dle instrukcí v kapitole **Dobíjení baterie**.



Zapnutí/vypnutí přístroje


Pro zapnutí přístroje krátce stikněte symbol on/off  umístěný na zadní části zařízení. Na displeji se ukáže „Halo Scanner Scanning“ a přístroj krátce pípne. Čtečka se automaticky vypne po 40 s nečinnosti.

Čtení kódu mikročipu

Přístroj je zapnutý. Přiložte přístroj na povrch těla zvířete, do oblasti, kde je dle předpokladů implantován mikročip (obvykle levá strana krku) a pohybujte s ním v kruhovém poli. V okamžiku, kdy čtečka detekuje mikročip, jeho číslo se objeví na displeji. V případě, že čtečka mikročip nedetekuje, informace se objeví na displeji. Pro opětovné čtení stiskněte tlačítko .

Dobíjení baterie

Čtečku připojte pomocí USB kabelu k PC. Před prvním spuštěním nechte baterii dobíjet 3,5 h.

Po stiknutí tlačítka  Vás nápis na displeji informuje o průběhu dobíjení.

Dotazy směřujte na Vašeho prodejce:

Naturalpet.cz

info@naturalpet.cz

tel. 606 900 428