

Čtečka mikročipů Animal ID PT 160

Přečte všechny ISO 11784/85 FDX B a ID 64 mikročipy

Rozměry: 120x60x15mm (dxšxh)


Jazyk: angličtina

Certifikace: ROHS, CE

Pracovní teplota: -15-45 °C

Záruka 2 roky

Před prvním použitím doporučujeme přístroj nabít připojením k USB konektoru ve vašem PC, popř. jiném zařízení. Postupujte dle instrukcí v kapitole **Dobíjení baterie**.

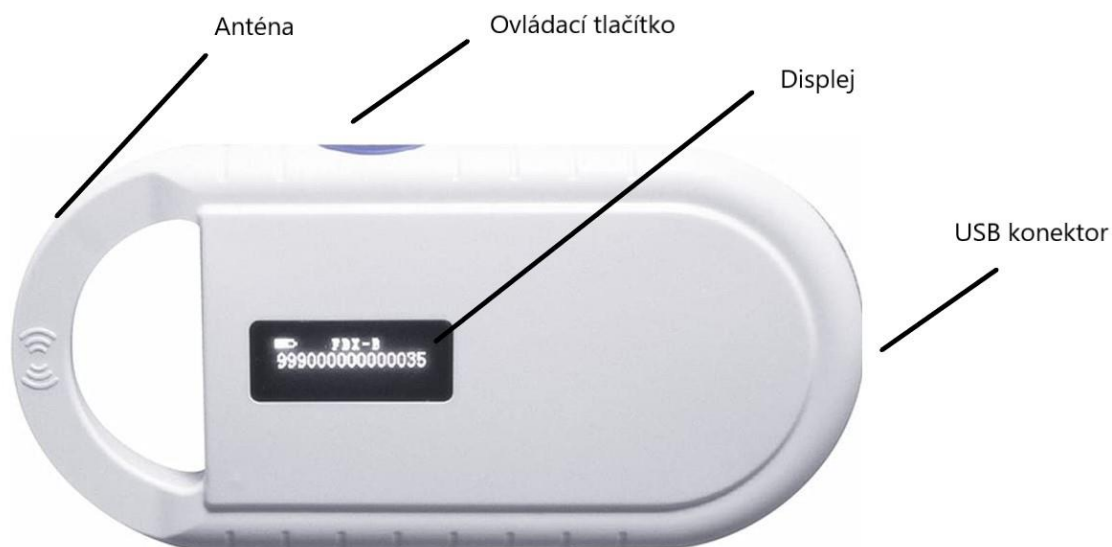

Zapnutí/vypnutí přístroje a čtení kódu mikročipu

Stiskněte ovládací tlačítko k zapnutí přístroje a ke spuštění čtecího režimu. Ihned po stisknutí tlačítka je čtečka aktivní a snaží se přečíst ID mikročipu. Čtení signalizuje běžící šipka na displeji. Po cca 10 s, kdy nenalezne čip, se čtečka přepne do standby režimu. Stisknutím ovládacího tlačítka se čtecí režim opět aktivuje. Pokud je v blízkosti antény mikročip, čtečka jej přečte a číslo zobrazí na displeji.

Po několika sekundách nečinnosti se přístroj automaticky vypne. Čtečku lze vypnout manuálně delším stisknutím ovládacího tlačítka.

Čtení kódu mikročipu

Přístroj a čtecí režim je aktivní (na displeji běží šipka). Přiložte přístroj na povrch těla zvířete, do oblasti, kde je dle předpokladů implantován mikročip (obvykle levá strana krku) a pohybujte s ním v kruhovém poli. V okamžiku, kdy čtečka detekuje mikročip, jeho číslo se objeví na displeji.

Dobíjení baterie

Čtečku připojte pomocí USB kabelu k PC, popř. jinému zařízení. Lze použít i nabíječku od mobilního telefonu s vhodnými parametry.

Nápis na displeji Vás informuje o průběhu dobíjení.

Dotazy směřujte na vašeho prodejce:

Naturalpet.cz

info@naturalpet.cz

tel. 606 900 428