

## Čtečka mikročipů ISO W90A

Rozměry: 168x88x15mm (vxšxh)

Váha: 110g


Kompatibilita: ISO 11784/85 FDX B

Čtecí vzdálenost cca 50-80 mm

Pracovní teplota: -10 – 50°C

Záruka 2 roky

Před prvním použitím doporučujeme přístroj nabít připojením k USB konektoru ve vašem PC, popř. jiném zařízení. Postupujte dle instrukcí v kapitole **Dobíjení baterie**.

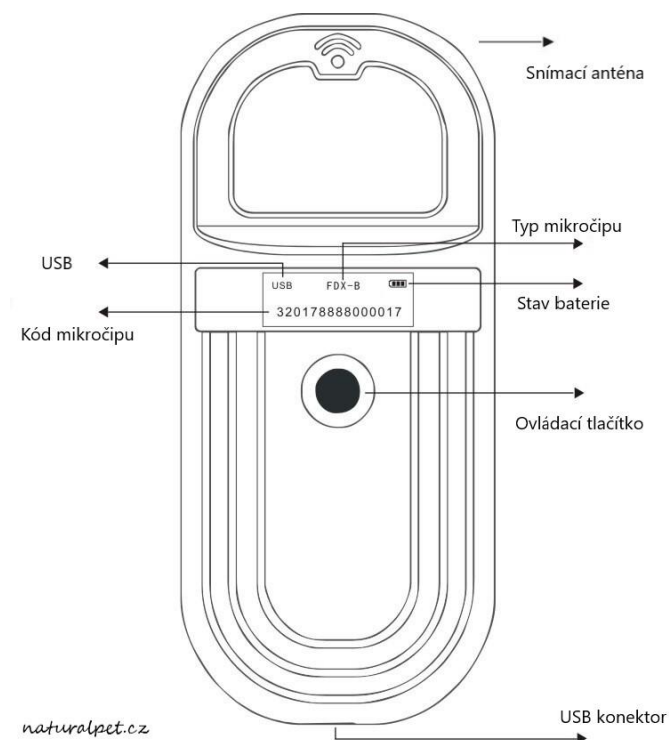

### Zapnutí/vypnutí přístroje a čtení kódu mikročipu

Stiskněte ovládací tlačítko k zapnutí přístroje a ke spuštění čtecího režimu. Ihned po stisknutí tlačítka je čtečka aktivní a snaží se přečíst ID mikročipu. Čtení signalizují běžící šipky na displeji. Po cca 10 s, kdy nenalezne čip, se čtečka přepne do standby režimu. Stisknutím ovládacího tlačítka se čtecí režim opět aktivuje. Pokud je v blízkosti antény mikročip, čtečka jej přečte a číslo zobrazí na displeji. Po několika sekundách nečinnosti se přístroj automaticky vypne.

### Čtení kódu mikročipu

Přístroj a čtecí režim je aktivní (na displeji běží šipka). Přiložte přístroj na povrch těla zvířete, do oblasti, kde je dle předpokladů implantován mikročip (obvykle levá strana krku) a pohybujte s ním v kruhovém poli. V okamžiku, kdy čtečka detekuje mikročip, jeho číslo se objeví na displeji.

### Dobíjení baterie

Čtečku připojte pomocí USB kabelu k PC, popř. jinému zařízení. Lze použít i nabíječku od mobilního telefonu s vhodnými parametry.

Nápis na displeji Vás informuje o průběhu dobíjení.

### Dotazy směřujte na vašeho prodejce:

Naturalpet.cz

[info@naturalpet.cz](mailto:info@naturalpet.cz)

tel. 606 900 428