

Čtečka mikročipů Animal ID Profi Stick

Rozměry: délka 80 cm, šířka v nejširším místě 8 cm

Váha: 540 g

Kompatibilita: FDX-B & HDX (ISO 11784/85), FDX-A (Destron/FECAVA, Avid/FECAVA) a EM H4102

Čtecí vzdálenost: ušní známky až 30 cm, mikročipy až 10 cm. Citlivá čtecí oblast je po celé délce tyče.

Pracovní teplota: -10 – 50°C

Záruka 2 roky.

Před prvním použitím doporučujeme přístroj nabít připojením k USB konektoru ve vašem PC, popř. jiném zařízení. Postupujte dle instrukcí v kapitole **Dobíjení baterie**.



Zapnutí/vypnutí přístroje a čtení kódu mikročipu

Stiskněte ovládací tlačítka ON/OFF k zapnutí přístroje. Stisknutím tlačítka „SCAN“ se čtečka aktivuje a snaží se přečíst ID mikročipu. Čtení signalizují běžící šipky na displeji. Přiložte přístroj na povrch těla zvířete, do oblasti, kde je dle předpokladů implantován mikročip (obvykle levá strana krku) a pohybujte s ním v kruhovém poli. V okamžiku, kdy čtečka detekuje mikročip, jeho číslo se objeví na displeji. Po cca 10 s, kdy nenalezne čip, se čtečka přepne do stand-by režimu. Stisknutím tlačítka „SCAN“ se čtecí režim opět aktivuje. Pokud je v blízkosti antény mikročip, čtečka jej přečte a číslo zobrazí na displeji.

Po několika desítkách sekund nečinnosti se přístroj automaticky vypne. Lze jej také vypnout dlouhým stisknutím tlačítka ON/OFF.

Menu

Po zapnutí přístroje otevřete menu stisknutím jedné z šipek na ovládacím panelu. V menu se pohybujte pomocí šipek vpravo nebo vlevo. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka „SCAN“. Zpět v menu dosáhnete stisknutím tlačítka „BACK“.

Paměť kódů mikročipů

V režimu „SCAN“ stiskněte některou z šipek na ovládacím panelu. Zobrazí se prohlížení paměti s přečtenými kódy mikročipů.

Dobíjení baterie

Čtečku připojte pomocí USB kabelu k PC, popř. jinému zařízení. Lze použít i nabíječku od mobilního telefonu s vhodnými parametry.

Nápis na displeji Vás informuje o průběhu dobíjení.

Dotazy směřujte na vašeho prodejce:

Naturalpet.cz

info@naturalpet.cz

tel. 606 900 428