


Čtečka mikročipů CT pocket reader

Tato čtečka umí přečíst všechny FDX mikročipy v souladu s normou ISO 11784/11785. Čtečka umožňuje číst i mikročipy s funkcí měření teploty. U mikročipů bez této funkce zobrazuje kód mikročipu. Před prvním použitím doporučujeme přístroj nabít připojením k USB konektoru ve vašem PC, popř. jiném zařízení. Postupujte dle instrukcí v kapitole **Dobíjení baterie**.

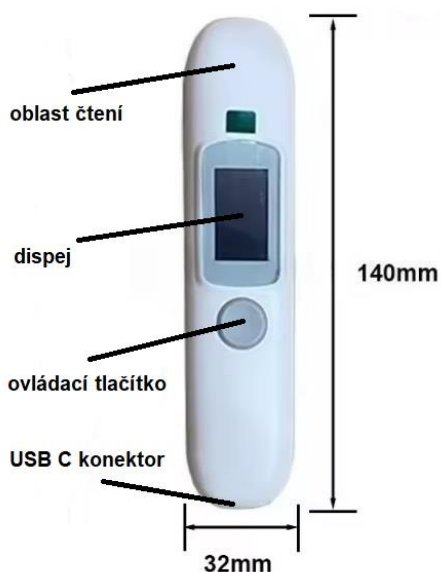

Zapnutí/vypnutí přístroje

Stiskněte a 2 s držte ovládací tlačítko k zapnutí přístroje a ke spuštění čtecího režimu. Čtecí režim trvá 10 s, pokud se mikročip nenačte dříve. Po skončení čtecího cyklu je pro jeho nové započetí nutné stisknout ovládací tlačítko. Přístroj vypnete přidržím ovládacího tlačítka po dobu 3 s.

Čtení kódu mikročipu

Přístroj je zapnutý a v režimu čtení. Přiložte přístroj na povrch těla zvířete, do oblasti, kde je dle předpokladů implantován mikročip (obvykle levá strana krku) a pohybujte s ním v kruhovém poli. V okamžiku, kdy čtečka detekuje mikročip, jeho číslo se objeví na displeji. Pokud má načtený mikročip funkci měření teploty, teplota se zobrazí na displeji pod kódem mikročipu. V případě, že čtečka mikročip nedetekuje, po 10 s se čtecí režim ukončí.

Dobíjení baterie

Připojte čtečku pomocí USB kabelu do konektoru. Nápis na displeji Vás informuje o průběhu dobíjení.

Parametry

Rozměry: 140x32x23mm (vxšxh)

Váha: 70 g

Kompatibilita: ISO 11784/85 FDX B

Čtecí vzdálenost až 80 mm

Pracovní teplota: -20 – 80 °C

Rozmezí teplot mikročipu: 30-55 °C

Odolnost IP 54

Dotazy směřujte na vašeho prodejce:

Naturalpet.cz

info@naturalpet.cz

tel. 606 900 428