

Čtečka mikročipů Animal ID PT 380

- Profesionální a extrémně citlivá čtečka mikročipů pro časté používání a komfortní práci se zvířaty.
- Velký a přehledný podsvícený displej.
- Přečte všechny FDX-B, FDX-A (ISO 11784/85), HDX, EMID mikročipy
- ROHS a CE certifikace
- Záruka 2 roky

Před prvním použitím je nutné do přístroje vložit přiložené baterie. Kryt baterií je na zadní spodní straně přístroje. Baterie je nutné vložit ve správné pozici dle šipek a polarity.



1. Základní ovládání

(1) Zapnutí

Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko „SCAN“. Zařízení se zapne a přejde do hlavního zobrazení.

(2) Skenování

V hlavním rozhraní stiskněte tlačítko „SCAN“. Po úspěšném načtení zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí kód. Pokud během 10 sekund nedojde k načtení kódu, zobrazí se na displeji hlášení „No Data“.

(3) Prohlížení dat

V hlavním rozhraní:

- stiskněte levé tlačítko „<“ pro posun nahoru v seznamu informací o kódech, stiskněte pravé tlačítko „>“ pro posun dolů.

(4) Automatické vypnutí

Pokud je zařízení zapnuté a během 120 sekund nedojde k žádné operaci tlačítka ani přenosu dat, zařízení se automaticky vypne a přejde do režimu spánku.

(5) Návrat na hlavní obrazovku

Po načtení štítku se na hlavní obrazovce zobrazí informace o datech štítku. Pro návrat do hlavního rozhraní podržte tlačítko „SCAN“ po dobu 2 sekund a poté jej uvolněte.

3. Nastavení systému

Při zapnutém zařízení podržte tlačítko „SCAN“. Čtečka přejde do režimu nastavení. Pomocí tlačítek „<“ a „>“ pohybuje kurzorem „šipky“ pro výběr jednotlivých funkcí.

1: Zpět

Přesuňte kurzor na menu „Back“ a stiskněte tlačítko „SCAN“ pro návrat na hlavní obrazovku skenování.

2: Nastavení jazyka

Pro změnu jazyka přesuňte kurzor na „Language Setting“ a stiskněte „SCAN“. Poté vyberte jazyk pomocí kurzoru.

3: Ukládání dat (Memory Enable)

4: Povolení opětovného čtení (Reread Allow)

Přesuňte kurzor na „Re-read Setting“ a tlačítkem „SCAN“ přepínáte mezi „Y“ a „N“.

5: Označování dat (Data Marking)

6: Porovnávání dat (Data Comparison)

7: Zvukové upozornění (Prompt Sound)

Přesuňte kurzor na „Buzzer“ a stiskem „SCAN“ přepínáte:

8: Mazání dat (Deleting Data)

Přesuňte kurzor na „Delete Data“ a třikrát stiskněte „SCAN“ pro vymazání všech uložených dat.

9: Zobrazení verze (Display Version)

10: Režim čtení (Card Reading Mode)

11: Bluetooth

12: Nastavení vypnutí (Shutdown Settings)

Přesuňte kurzor na „Shutdown“ a stiskněte „SCAN“.

13: Obnovení továrního nastavení (Factory Settings)

Dotazy směřujte na vašeho prodejce:

Naturalpet.cz

info@naturalpet.cz

tel. 606 900 428