

Čtečka mikročipů Animal ID PT 200

Profesionální a extrémně citlivá čtečka mikročipů pro časté používání a komfortní práci se zvířaty.


Velký a přehledný podsvícený displej s vysokým rozlišením.

Přečte všechny FDX-B (ISO 11784/85) a ID64 mikročipy

ROHS a CE certifikace

Záruka 2 roky

Před prvním použitím je nutné do přístroje vložit 3 ks kvalitních tužkových baterií AA. Kryt baterií je na zadní spodní straně přístroje. Baterie je nutné vložit ve správné pozici dle šipek a polarity.

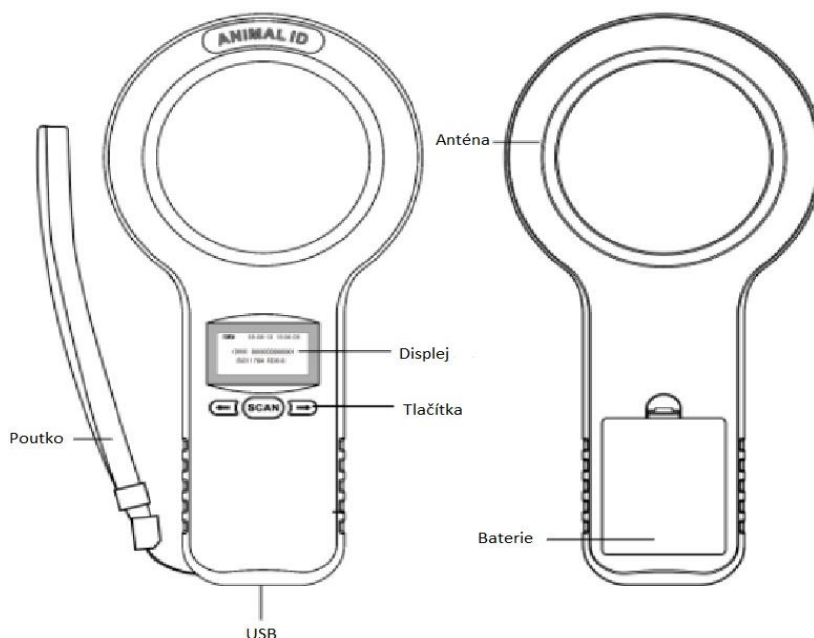

Operační menu

Stiskněte šipku ← pro vstup do menu. Následně stiskněte znovu šipku ← pro procházení menu. Pozice v menu je označena *. Pro potvrzení stiskněte šipku →. Pro návrat o krok zpět stiskněte Scan.

1. Record – paměť přečtených mikročipů. Stiskněte šipku ← a šipku → pro procházení paměti
2. Options – Nastavení
 - 1. Language – nastavení jazyku
 - 2. Record options – nastavení paměti. V módu NO je každé duplicitní číslo mikročipu uloženo pouze jednou. V módu YES je každé duplicitní číslo uloženo tolikrát, kolikrát je přečteno.
 - 3. Date and Time – nastavení data a času. Při výměně baterie se čas a datum vyresetuje.
 - 4. Beep mode – tón při stisku tlačítka.
 - 5. Output – výstup dat přes USB.
 - 6. Power mode – automatické vypnutí při nečinnosti. Nastavit lze 1 – 20 minut.
 - Clear all records – vymaže paměť přečtených mikročipů.
 - Firmware update – aktualizace firmware.
3. Device info – Číslo přístroje a číslo verze operačního programu
4. Shut down – vypnutí přístroje

Čtení kódu mikročipu

Zmáčknete Scan a čtečka okamžitě začne vyhledávat mikročip. Čtečkou pohybujte po těle zvířete v místě předpokládaného výskytu mikročipu. Po 10s neúspěšného vyhledávání mikročipu se čtení ukončí. Opětovným stisknutím tlačítka Scan se znovu začne. **Čtečka umožňuje také kontinuální čtení** – držte šipku vpravo → a zároveň stiskněte Scan. Opakování postupu kontinuální čtení ukončí.

Dotazy směřujte na vašeho prodejce:

Naturalpet.cz

info@naturalpet.cz

tel. 606 900 428